

В/в введение лекарственного препарата: эластомерное устройство

Дополнительную
информацию
см. в буклете
«Руководство по
инфузионной
терапии».

Данная информация не заменяет
собой профессиональные
рекомендации. Всегда следуйте
рекомендациям вашего врача,
медсестры или фармацевта.

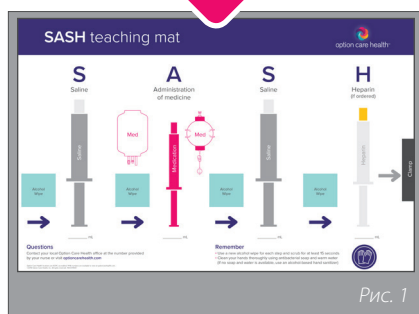


Рис. 1

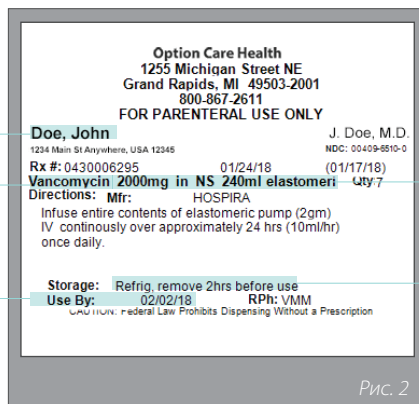


Рис. 2

Для демонстрационных целей. Соблюдайте
указания на **ВАШЕМ** шприце для груши
с лекарственным препаратом.

Подготовка

- Достаньте лекарственный препарат из холодильника как минимум за ____ (минут/часов) до использования. Ознакомьтесь с представленными на этикетке инструкциями о том, когда нужно извлекать препарат из холодильника.
- **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не ускоряйте процесс нагрева путем подогревания препарата или с помощью микроволновой печи
- Используйте чистую рабочую область
- Тщательно вымойте руки, используя антибактериальное мыло и теплую воду (если мыла и воды нет, используйте спиртовой антисептик для рук)
- Вытрите руки чистым полотенцем

1 | Подготовьте необходимые принадлежности и клеенку SASH в соответствии с указаниями:

- A. Клеенка SASH (см. рис. 1)
- B. Груша для лекарственного препарата
- C. Промывочные шприцы
 - ____ мл солевого раствора
 - ____ мл гепаринового раствора ____ ед./мл гепаринового раствора
- D. Спиртовые салфетки
- E. Контейнер для острых предметов (при необходимости) и (или) контейнер для мусора

2 | Осмотрите грушу для лекарственного препарата

Осмотрите грушу для лекарственного препарата. Проверьте этикетку на груше (см. рис. 2) и удостоверьтесь в следующем:

- A. Правильные имя и фамилия пациента
- B. Правильное название препарата
- C. Объем / количество препарата
- D. Время, необходимое для выдержки препарата при комнатной температуре
- E. Срок годности препарата

Груша для лекарственного препарата не должна иметь трещин, протечек, плавающих частиц или изменения цвета. В случае выявления проблем с грушей с препаратом или неправильных этикеток позвоните медсестре или фармацевту.



Рис. 3

3 | Приготовьте промывочные шприцы

- A.** Перед использованием шприца с усилием надавливайте на него большим пальцем (при этом колпачок наконечника должен быть закрыт) до тех пор, пока не почувствуете, что плунжер движется.
- B.** Выпустите воздух и излишек раствора, повернув колпачок наконечника и выдвинув плунжер вперед. Выдавите лишний раствор, чтобы в шприце осталось количество в соответствии с указаниями медсестры. (См. рис. 3)
- C.** Установите колпачок наконечника обратно, не прикасаясь к наконечнику рукой. Если вы прикоснетесь к нему, вам нужно будет начать все заново, используя чистый шприц. Отложите шприц в сторону до тех пор, пока вы не будете готовы к его использованию.
- D.** Повторите процедуру для всех промывочных шприцев, необходимых для введения дозы.



Рис. 4

4 | Промойте систему для в/в введения солевым раствором

Использование одного из подготовленных промывочных шприцев с солевым раствором из шага 3.



- A.** Протирайте безыгольное соединительное устройство на в/в катетере спиртовой салфеткой не менее **15 СЕКУНД**, а затем высушите его на воздухе. (См. рис. 4)
- B.** Снимите защитный колпачок с промывочного шприца с солевым раствором. **НЕ** прикасайтесь к кончику шприца после удаления колпачка.

Утилизируйте промывочный шприц с солевым раствором, если стерильный наконечник без колпачка прикоснется к каким-либо неочищенным поверхностям.



Рис. 5

- C.** Подсоедините промывочный шприц с солевым раствором к безыгольному соединительному устройству на в/в катетере путем надавливания и движения по часовой стрелке до полного соединения. (См. рис. 5)
- D.** Откройте зажим на в/в катетере и (или) в/в наборе для удлинения, если указано.
- E.** Промойте в/в катетер, используя метод «надавливание / пауза». **НЕ** пытайтесь промывать катетер в случае наличия сопротивления, позвоните медсестре или фармацевту.
 - _____ мл солевого раствора
- F.** Отсоедините или утилизируйте промывочный шприц с солевым раствором в контейнер для мусора.

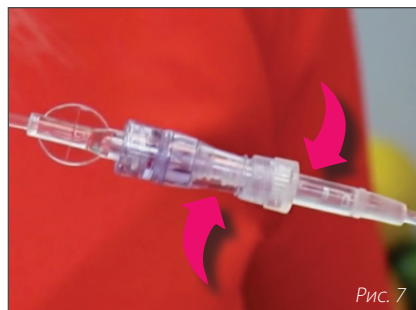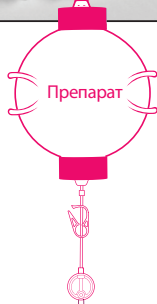

5 | Введите лекарственный препарат

- A. Протирайте безыгольное соединительное устройство на в/в катетере спиртовой салфеткой не менее **15 СЕКУНД**, а затем высушите его на воздухе. (См. рис. 4)
- B. Снимите защитный колпачок с трубки для в/в введения. (См. рис. 6)
- C. Плотно подсоедините трубку для введения препарата к безыгольному соединительному устройству на в/в катетере путем надавливания и движения по часовой стрелке до полного соединения. (См. рис. 7)
- D. Откройте зажим на трубке для введения препарата.
(Препарат будет поступать в течение _____ минут в соответствии с указаниями медсестры.)
- E. Когда груша для лекарственного препарата полностью сдуется, закройте зажим на трубке для введения препарата. Утилизируйте грушу в соответствии с указаниями.

Если по истечении 30 минут устройство не сдувается, убедитесь в том, что зажимы открыты. Если это не помогло, обратитесь к медсестре или фармацевту.

6 | Промойте систему для в/в введения солевым раствором

Использование одного из подготовленных промывочных шприцев с солевым раствором из шага 3.

- A. Протирайте безыгольное соединительное устройство на в/в катетере спиртовой салфеткой не менее **15 СЕКУНД**, а затем высушите его на воздухе. (См. рис. 4)
- B. Снимите защитный колпачок с промывочного шприца с солевым раствором. **НЕ** прикасайтесь к кончику шприца после удаления колпачка.

Утилизируйте промывочный шприц с солевым раствором, если стерильный наконечник без колпачка коснется к каким-либо неочищенным поверхностям.

- C. Подсоедините промывочный шприц с солевым раствором к безыгольному соединительному устройству на в/в катетере путем надавливания и движения по часовой стрелке до полного соединения. (См. рис. 5)
- D. Промойте в/в катетер, используя метод «надавливание / пауза». **НЕ** пытайтесь промывать катетер в случае наличия сопротивления, позвоните медсестре или фармацевту.
 - _____ мл солевого раствора
- E. Закройте фиксатор на в/в катетере и/или в/в наборе для удлинения, если вас не проинструктировали использовать гепариновый раствор.
- F. Отсоедините и выбросьте промывочный шприц с солевым раствором в контейнер для мусора.

7 | Промойте систему для в/в введения

гепариновым раствором (если предписано)

Использование одного из подготовленных промывочных шприцев с гепариновым раствором из шага 3.

- A. Протирайте безыгольное соединительное устройство на в/в катетере спиртовой салфеткой не менее **15 СЕКУНД**, а затем высушите его на воздухе. (См. рис. 4)
- B. Снимите защитный колпачок с промывочного шприца с гепариновым раствором. **НЕ** прикасайтесь к кончику шприца после удаления колпачка.

Утилизируйте промывочные шприцы с гепариновым раствором в случае, если стерильный наконечник без колпачка прикоснется к каким-либо неочищенным поверхностям.

- C. Подсоедините промывочный шприц с гепариновым раствором к безыгольному соединительному устройству на в/в катетере путем надавливания и движения по часовой стрелке до полного соединения. (См. рис. 5)
- D. Промойте в/в катетер, используя метод «**надавливание / пауза**». **НЕ** пытайтесь промывать катетер в случае наличия сопротивления, позвоните медсестре или фармацевту.
 - _____ мл гепаринового раствора _____ ед./мл гепаринового раствора
- E. Защелкните клипсу на в/в катетере и/или в/в наборе для удлинения, если это указано.
- F. Отсоедините или выбросьте промывочный шприц с гепариновым раствором в контейнер для мусора.

С вопросами или проблемами обращайтесь к медсестре или врачу



Коллектив Option Care Health всегда готов помочь по телефону 24 часа в сутки.

Чтобы посмотреть видеоинструкции или получить доступ к дополнительным ресурсам, посетите сайт optioncarehealth.com/education.

Краткий обзор процедуры (SASH):

- Промойте систему для в/в введения _____ мл солевого раствора (S)
- Вводите препарат (A) в течение _____ минут
- Промойте _____ мл солевого раствора (S)
- Промойте _____ мл гепаринового раствора (H), если предписано

